



ACCUVAC Lite

Simplemente potencia: aspiración en su versión sencilla

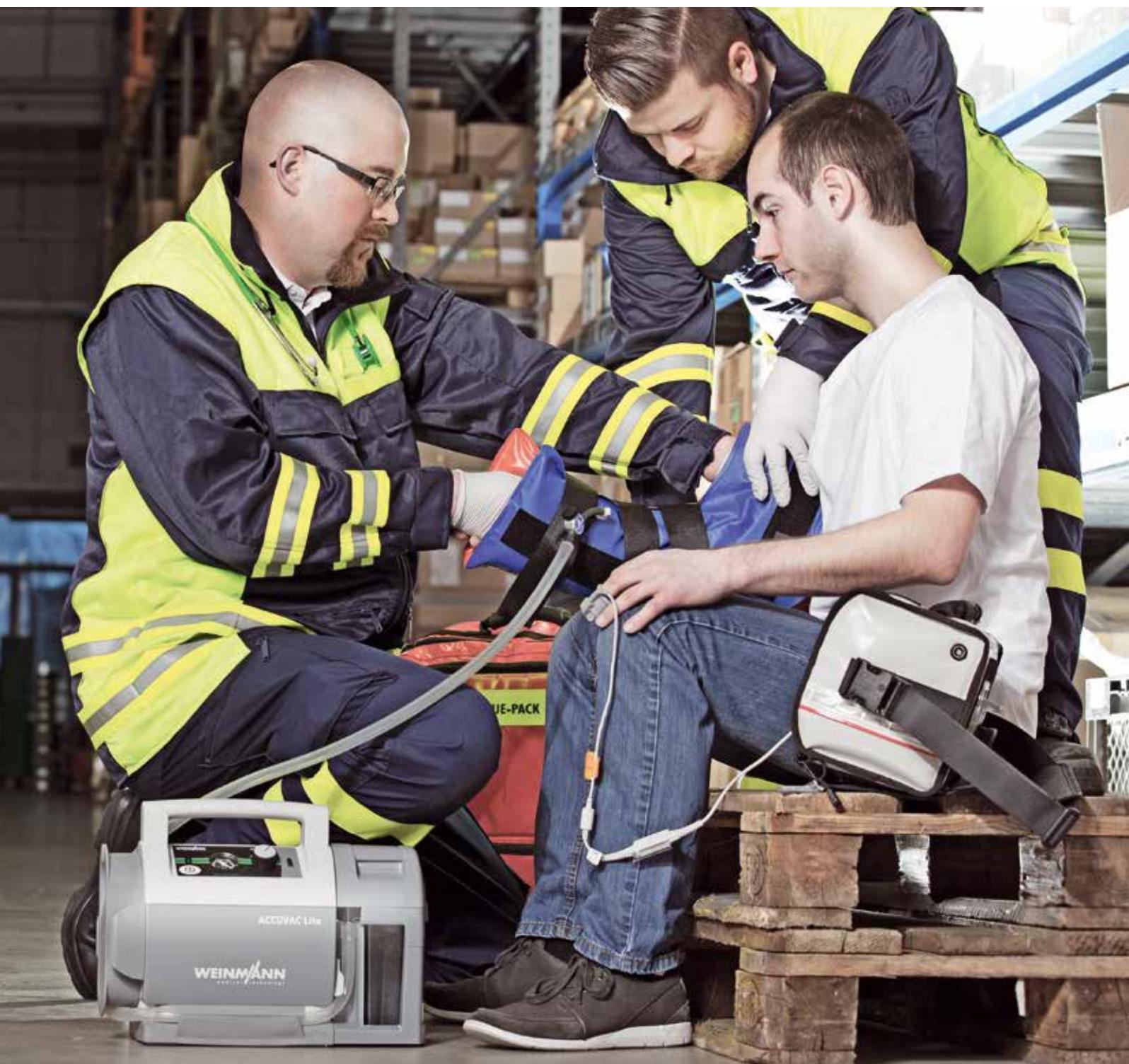

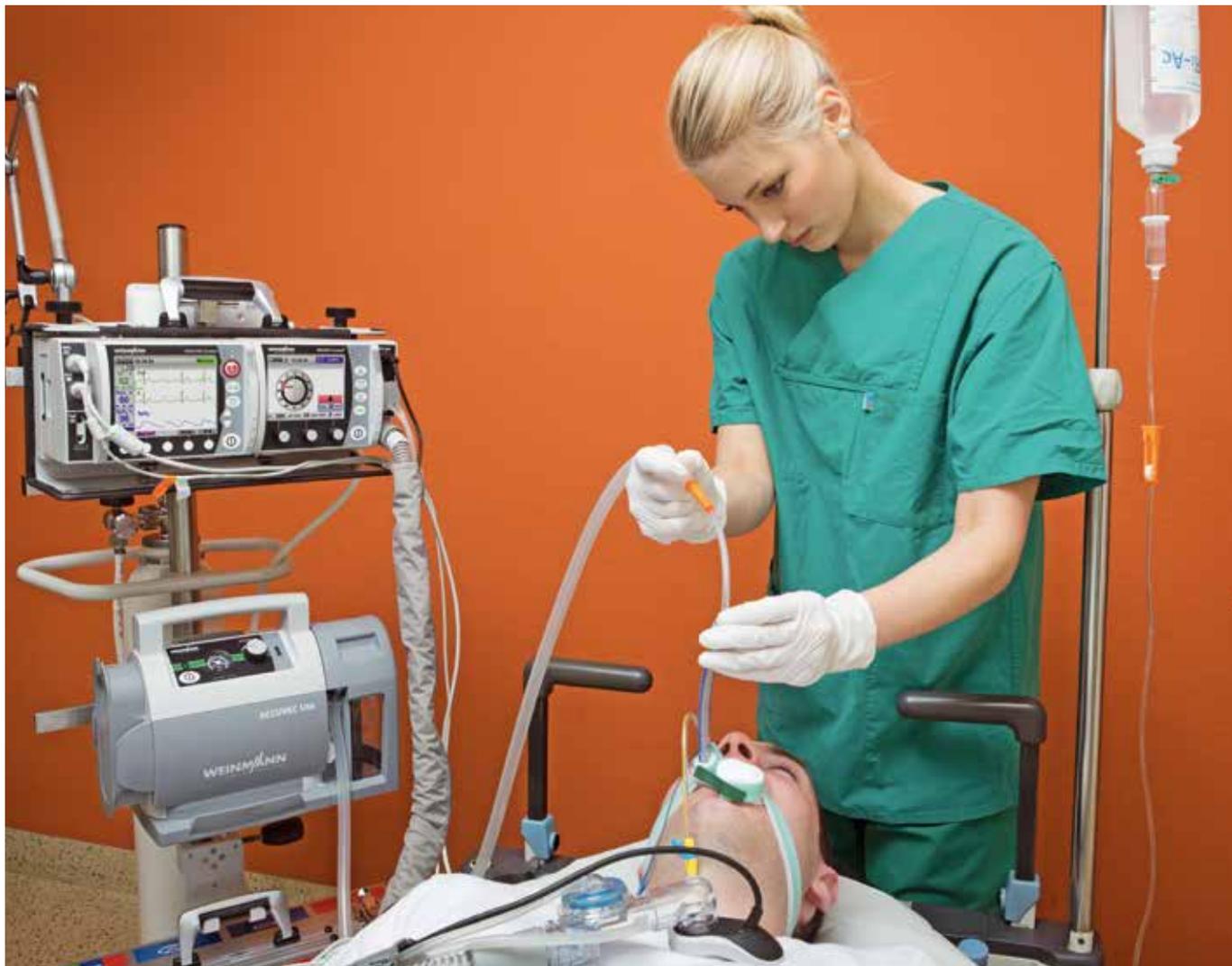

ACCUVAC Lite

Simplemente potencia: aspiración en su versión sencilla

En situaciones de emergencia es de vital importancia mantener libres las vías respiratorias de forma rápida y efectiva. ACCUVAC es desde hace décadas la referencia para la aspiración en las vías respiratorias. ACCUVAC Lite mantiene libres las vías respiratorias mediante la aspiración de la zona orofaríngea de un paciente o mediante una aspiración endotraqueal o bronquial. La elevada potencia de aspiración y su sencillo manejo garantizan una terapia rápida y efectiva en intervenciones de emergencia o en la clínica.

Amplio ámbito de aplicación, manejo flexible

Mediante el regulador de vacío de fácil manejo se puede realizar un ajuste continuo y una adaptación del rango de presión negativa de ACCUVAC Lite. De esta forma se puede utilizar tanto en adultos como en niños e infantes. Además de la aspiración en las vías respiratorias, ACCUVAC Lite se puede utilizar para la evacuación de férulas y colchones de vacío.

Sus ventajas, de un vistazo

- Muy versátil
- Seguro e higiénico
- Resistente y de manejo intuitivo
- Conforme a EN 1789, montaje seguro con soporte mural en el vehículo



Cómoda utilización, amplio rango de aplicaciones

- Elevada potencia de aspiración de aprox. 26 l/min a -0,8 bar (en la entrada del aparato).
- Regulación continua de la presión negativa hasta -0,8 bar mediante regulador de vacío de fácil manejo
- Presión negativa visible en el manómetro de contenido
- Recolección segura de secreciones mediante el recipiente colector reutilizable y esterilizable en autoclave, dotado de filtro bacteriano y seguro antirrebosamiento, o mediante bolsa de aspiración Serres® desechable con filtro bacteriano integrado
- Cambio de batería: Realizable por parte del usuario fácilmente, desde fuera y sin herramientas
- Carcasa robusta de materiales resistentes a los golpes
- Gracias al bajo centro de gravedad no se vuelca



ACCUVAC Lite

con sistema de recolección reutilizable, soporte mural, bolsa de accesorios y línea de conexión de 12 V, WM 11720



ACCUVAC Lite

con sistema de recolección desechable, soporte mural y línea de conexión de 12 V, WM 11715, y bolsa protectora, WM 11692

Manejo óptimo para el día a día de los servicios de urgencia y rescate

- Alojamiento óptimo del tubo flexible para aspiración en el soporte lateral para tubos flexibles
- Desbloqueo con una mano pulsando la tecla del soporte mural
- Compatible con el soporte mural ACCUVAC ya existente
- Opcionalmente con bolsa de accesorios grande, bolsa protectora y/o cinturón de soporte

Para todos los tipos de paciente y todas las intervenciones

- Aspiración de secreciones y alimentos
- Aspiración endotraqueal y bronquial
- Adecuado para la aplicación en infantes, niños y adultos
- Evacuación de férulas y colchones de vacío




Servicio técnico del fabricante

Línea de atención telefónica:
+49 40 88 18 96 122

Servicedaten: ACCUVAC Lite

Garantía del fabricante	2 años
Intervalo de CTS	Sin CTS
Intervalo de mantenimiento	Sin mantenimiento
Control de funcionamiento	Manual
Cambio de la batería	Fácil, desde fuera, sin herramientas
Batería	Sin mantenimiento, no requiere calibración
Reequipamiento de sistema desechable/sistema reutilizable	fácil sin herramientas

Seguridad gracias al manejo intuitivo

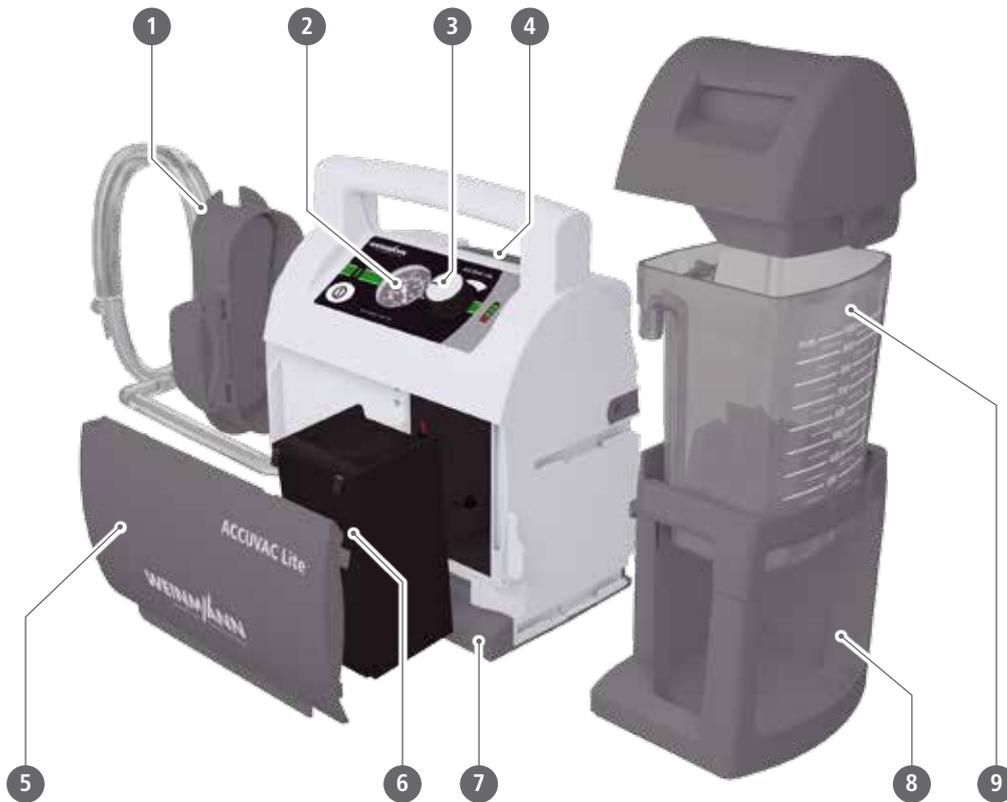

1. Soporte para el tubo de aspiración

Para un almacenaje óptimo

2. Manómetro

Para leer la presión negativa

3. Regulador de vacío fácil de usar

Ajuste de aspiración infinito

4. Botón de liberación del sistema de sujeción

Liberación sencilla con una sola mano

5. Tapa del compartimento de batería

Puede abrirse sin herramientas para un cambio rápido y sencillo de batería

6. Batería recargable

Batería de plomo con carga rápida hasta el 80%

7. Base del equipo con guía

8. Soporte del recipiente
Materiales resistentes a impactos para incrementar la seguridad

9. Recipiente recolector de secreciones reutilizable, 1000 ml

Con protección anti-rebosamiento, filtro antibacteriano desechable. Cuando está lleno, el ACCUVAC Lite deja de aspirar.



Datos técnicos

ACCUVAC Lite

Clase de producto según la directiva 93/42/CEE	Ila
Conformidad con RoHS según la directiva 2011/65/EU (RoHS II)	Sí
Klassifikation nach EN ISO 10079-1	High vacuum/high flow
Normas aplicadas	EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, EN 60601-1-12, EN 60601-1-11
Dimensiones (An x Al x Pr)	<ul style="list-style-type: none"> • con sistema de recolección reutilizable 370 x 277 x 146 mm • con sistema de recolección desechable 370 x 277 x 152 mm
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • Aparato con batería/sin sistema de recolección ni alojamiento 4,6 kg • Sistema de recolección reutilizable con alojamiento para sistema de recolección reutilizable 1,00 kg • Sistema de recolección desechable con alojamiento para sistema de recolección desechable 0,65 kg
Margen de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • En servicio de -5 °C a +50 °C • Transporte/almacenamiento de -40 °C a +70 °C
Consumo máximo de corriente	3,7 A
Tensión nominal	12 V CC nominal (mín. 10 V, máx. 15 V)
Potencia de aspiración en la entrada del aparato (sin sistema de recolección) a -0,8 bar, batería llena y 21 °C/1.013 hPa	26 l/min
Potencia de aspiración en la entrada del sistema de recolección reutilizable a -0,8 bar, batería llena y 21 °C/1.013 hPa	23 l/min
Ajuste del vacío	Mediante regulador continuo de vacío
Modo de funcionamiento	S2 45 min
Grado de protección	IP34D
Tipo de batería	Plomo
Batería	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo de carga Estado de la batería 80%: 2,75 h Estado de la batería 100%: 14 h • Vida útil Aprox. 400 ciclos de carga • Funcionamiento con batería >30 min (funcionamiento ininterrumpido con batería llena/nueva)
Volumen del recipiente colector	1.000 ml
Tubo flexible para aspiración reutilizable	10 mm (d. i.), 1.300 mm (longitud)
Tubo flexible desechable para aspiración	7 mm (d. i.), 1.800 mm (longitud)

CE 0124



Reservado el derecho a modificar los datos técnicos.

 Designed in Germany

Aspirador de secreciones

ACCUVAC Lite con sistema de recolección reutilizable*	WM 11700
ACCUVAC Lite con sistema de recolección reutilizable*, soporte mural y línea de conexión de 12 V	WM 11710
ACCUVAC Lite con sistema de recolección reutilizable*, soporte mural, bolsa de accesorios y línea de conexión de 12 V	WM 11720
ACCUVAC Lite con sistema de recolección reutilizable* y cargador de 100 V a 240 V	WM 11730
ACCUVAC Lite con sistema de recolección reutilizable*, bolsa de accesorios	WM 11740
ACCUVAC Lite con sistema de recolección desechable	WM 11705
ACCUVAC Lite con sistema de recolección desechable, soporte mural y línea de conexión de 12 V	WM 11715
ACCUVAC Lite con sistema de recolección desechable, soporte mural, bolsa de accesorios y línea de conexión de 12 V	WM 11725
ACCUVAC Lite con sistema de recolección desechable y cargador de 100 V a 240 V	WM 11735
ACCUVAC Lite con sistema de recolección desechable, bolsa de accesorios	WM 11745

* Por favor tenga en cuenta que el sistema de recolección reutilizable viene equipado con un filtro antibacteriano desechable.

Accesorios y Material desechable

Material desechable

- | | |
|---|----------|
| 1. Bolsa de aspiración Serres®
1.000 ml, con filtro hidrófobo y gelificante
(contenido del embalaje: 32 unidades en caja) | WM 17800 |
| 2. Tubo flexible desechable para aspiración
con boquilla para utilización con el sistema
desechable, 1.800 mm (longitud), 7 mm (d. i.),
también disponible en sets de 10, 20, 32 y 50 unidades | WM 10778 |
| 3. Tubo flexible reutilizable para aspiración
1.300 mm (longitud), 10 mm (d. i.), también
disponible en sets de 10, 20 y 50 unidades | WM 10662 |
| 4. Boquilla para tubo flexible reutilizable
para aspiración de 10 mm (d. i.)
también disponible en sets de 10, 20 y 50 unidades | WM 10666 |
| 5. Set de filtros bacterianos para recipiente
colector reutilizable, set de 10 unidades | WM 17830 |

Accesorios de ACCUVAC Lite

- | | |
|---|----------|
| 6. Bolsa de accesorios
se requiere tapa de compartimento de la batería
para bolsa de accesorios (WM 11714) | WM 11691 |
| 7. Bolsa protectora | WM 11692 |
| 8. Cinturón de soporte | WM 11693 |
| 9. Línea de conexión de 12 V | WM 10650 |
| 10. Unidad de alimentación eléctrica y cargador
para corriente alterna de 100 V a 240 V en el
enchufe de conexión de ACCUVAC, incl. cable de
alimentación según EN 50075 («enchufe europeo») | WM 2620 |
| 11. Set de reequipamiento de sistema de recolección
reutilizable, formado por: <ul style="list-style-type: none"> • Set, sistema de recolección reutilizable (WM 17821) • Alojamiento para sistema de recolección
reutilizable (WM 11654) | WM 17820 |
| 12. Set de reequipamiento de sistema de recolección
desechable, formado por: <ul style="list-style-type: none"> • Alojamiento para sistema de recolección
desechable (WM 11754) • Tubo flexible de vacío para recipiente
colector Serres® (WM 11761) • Recipiente colector Serres®, completo (WM 10790) | WM 17825 |
| 13. Set de montaje en raíles estándar de hospital
con 2 adaptadores necesario además para fijación
en los rieles de aparatos | WM 15805 |
| 14. Soporte mural para ACCUVAC
para el montaje directo en la pared, set de montaje incluido | WM 15208 |
| 15. Chapa de sostén para rieles de aparatos
necesaria además para colgar en los rieles de aparatos | WM 15845 |

Set de reequipamiento de bolsa de accesorios WM 17839
formado por:

- Tapa de compartimento de la batería para
bolsa de accesorios (WM 11714)
- Bolsa de accesorios (WM 11691)

Soporte de pared para el transformador y el cargador WM 15844





Piezas de repuesto para sistema reutilizable

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Parte superior de la tapa del recipiente colector | WM 11657 |
| 2. | Soporte del filtro | WM 11661 |
| 3. | Junta tórica para soporte del filtro | WM 11663 |
| 4. | Filtro bacteriano | WM 11659 |
| 5. | Parte inferior de la tapa del recipiente colector | WM 11658 |
| 6. | Flotador | WM 11662 |
| 7. | Recipiente colector reutilizable de 1.000 ml | WM 11653 |
| 8. | Mehrweg-Absaugschlauch 10 mm ID | WM 10662 |
| 9. | Boquilla para tubo flexible reutilizable para aspiración de 10 mm (d. i.) | WM 10666 |
| 10. | Alojamiento para sistema de recolección reutilizable | WM 11654 |

Tapa del recipiente colector, completo, formado por las piezas de repuesto 1 – 6 WM 17822

Set, sistema de recolección reutilizable formado por las piezas de repuesto 1 – 9 WM 17821

Set de reequipamiento de sistema de recolección reutilizable, formado por las piezas de repuesto 1 – 10 WM 17820

Piezas de repuesto para sistema desechable Serres®

Recipiente colector Serres®, completo, formado por: WM 10790

- Recipiente colector, 1.000 ml (WM 10775)
- Bolsa de aspiración
- Bolsa de aspiración desechable con boquilla (WM 10778)

Recipiente colector Serres®, 1.000 ml WM 10775

Tubo flexible de vacío para recipiente colector Serres® WM 11761

Alojamiento para sistema de recolección desechable WM 11754

Set de sistema de recolección desechable, formado por: WM 17826

- Tubo flexible de vacío para recipiente colector Serres® (WM 11761)
- Recipiente colector Serres®, completo (WM 10790)

Pieza acodada en el recipiente colector Serres®, reutilizable WM 10799

Piezas de repuesto para ACCUVAC Lite

Set de tecla de desbloqueo WM 17837

Batería de plomo WM 10747

Tapa de compartimento de la batería (sin enganches para bolsa de accesorios) WM 11704

Dispositivo de enrollado de tubo flexible WM 11664

Base del aparato WM 11677

Simply Professional

WEINMANN Emergency es una empresa familiar, dedicada a la fabricación de tecnología médica y activa en el ámbito internacional. Con nuestras soluciones para el ámbito de medicina de urgencias y emergencias, transporte y situaciones de catástrofes, marcamos pauta en salvar vidas humanas. Colaborando estrechamente con profesionales de Hospitales, clínicas, servicios de emergencia y fuerzas armadas, desarrollamos productos sanitarios innovadores para la respiración artificial y la desfibrilación. Desde hace más de 100 años ofrecemos a nuestros clientes la máxima seguridad, experiencia y calidad "Made in Germany".

Alemania

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12
22525 Hamburg
Germany

T: +49 40 88 18 96-0 Reception
F: +49 40 88 18 96-480 Reception
T: +49 40 88 18 96-120 Customer Service
T: +49 40 88 18 96-122 After-Sales Service
E: info@weinmann-emt.de

Centro de producción, logística, servicio

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Siebenstücken 14
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

China

Weinmann (Shanghai) Medical Device Trading Co. Ltd.
T: +86 21 52 30 22 25 • info@weinmann-emt.cn

Francia

WEINMANN Emergency France SARL – Paris-Igny
T: +33 1 69 41 51 20 • info@weinmann-emt.fr

Rusia

Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg
T: +7 812 633 30 82 • info@weinmann-emt.ru

Singapur

Weinmann Singapur PTE, Ltd.
T: +65 65 09 44 30 • sales-singapore@weinmann-emt.de

España

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG
T: +34 91 79 01 137 • sales-spain@weinmann-emt.de